

# Pluslife HPV 16/18/45 Testkarte

Nukleinsäuren-Testkarte  
zur Identifizierung von 3 Hochrisiko-Varianten  
des Humanen Papillomavirus


Humanes Papillomavirus Typ16

Humanes Papillomavirus Typ 18

Humanes Papillomavirus Typ 45



Molekularbiologische Diagnostik  
zum Nachweis von HPV  
Schnell, sicher und unkompliziert

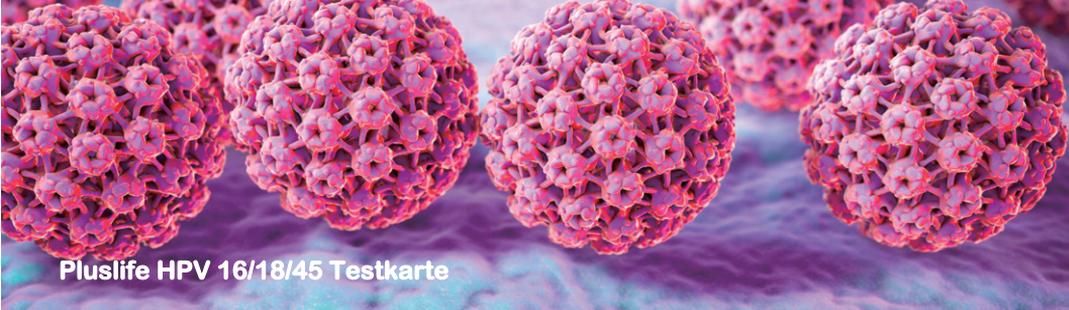

## Pluslife HPV 16/18/45 Testkarte

Pluslife Mini Dock ist ein molekularbiologisches Schnelldiagnosesystem, das mit hoher Genauigkeit die drei Hochrisiko-Varianten 16, 18 und 45 des Humanen Papillomavirus nachweist. Die von Pluslife entwickelte Methode (RHAM) beruht auf der isothermalen Nukleinsäure-Amplifikationstechnologie und liefert zuverlässige Resultate, vergleichbar mit einem PCR-Test. Das Gerät ist einfach zu bedienen, kompakt und mobil einsetzbar. Die Ergebnisse liegen bereits nach maximal 35 Minuten vor.

## Merkmale




-  Ergebnis innerhalb von 35 Min.  
SCHNELL
-  Testvorbereitung 2 Min.  
EINFACH
-  Nachweisgrenze (LoD)  
800 Kopien/mL  
GENAU
-  In 4 Schritten von der  
Probe zum Ergebnis  
EFFIZIENT

# Testdurchführung




## 1. Probennahme

Probennahme durch Zervix- oder Vaginalabstrich

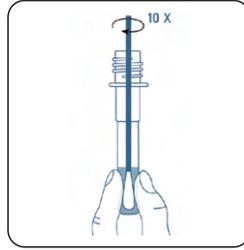


## 2. Probe mischen

Tupfer in das Röhrchen einführen, mischen, 10-mal ausdrücken, dann Tupfer entsorgen

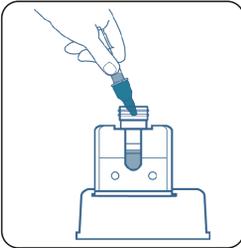

## 3. Testkarte vorbereiten

Überführen der Probe in die Testkarte

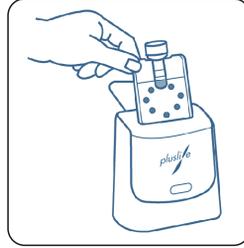

## 4. Testdurchlauf

Ö!èó!á•&@#) É  
V^•dæø!á!æ!ó!è!á  
^!•ø&^! Á! á!Á!•ó!æø!}

# Ergebnis ablesen



✓ Mini Dock



✓ PC Software



✓ Smartphone-App

# Anwendungsbereiche



Praxis





Krankenhaus



Sonstige

# Spezifikationen

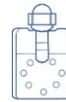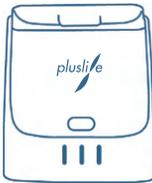

## Pluslife Mini Dock

Abmessungen	101 x 91 x 65 mm
Gewicht	210 g
Software	Smartphone-App oder PC
Einsatztemperatur	15-30°C
Luftfeuchtigkeit	≤ 80%

## Pluslife HPV 16/18/45 Testkarte

Zielpathogen	HPV Typ 16, Typ 18, und Typ 45
Nachweisgrenze (LoD)	800 Kopien/mL
Durchlaufzeit (TAT)	35 Min.
Haltbarkeit	9 Monate bei Raumtemperatur
Probennahme	Zervix- oder Vaginalabstrich

## Guangzhou Pluslife Biotech Co.,Ltd.

 Floor 3, Block E, Runhui Science & Technology Park, No.18 Shenzhou RD, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China

 +86-020-31703986 
  market@pluslife.com 
  www.pluslife.com



Website



LinkedIn



Line

PLHPV161845-INT-20230322

Ihr Vertriebspartner in Deutschland



Haben Sie Fragen?

KONTAKTIEREN SIE UNS  +49 - 6151 - 8002380

aprimo diagnostics GmbH & Co. KG, Pflugstadt, T +49 (0)6151 800 238-0, [www.aprimo.com](http://www.aprimo.com)