



Pluslife NG/UU Testkarte

Nukleinsäuren-Testkarte
zum Nachweis von 2 STI-Erregern

Neisseria gonorrhoeae

Ureaplasma urealyticum



Molekularbiologische Diagnostik zum Nachweis
von sexuell übertragbaren Infektionen (STI)

Schnell, sicher und unkompliziert

Pluslife NG/UU Testkarte


Pluslife Mini Dock ist ein molekularbiologisches Schnelldiagnosesystem, das mit hoher Genauigkeit *Neisseria gonorrhoeae* (NG) und *Ureaplasma urealyticum* (UU) in einem einzigen Test nachweist.

Die von Pluslife entwickelte Methode (RHAM) beruht auf der isothermalen Nukleinsäure-Amplifikationstechnologie und liefert zuverlässige Resultate – vergleichbar mit einem PCR-Test. Das Gerät ist einfach zu bedienen, kompakt und mobil einsetzbar. Das Testergebnis liegt bereits nach maximal 35 Minuten vor.

Merkmale




Testdurchführung

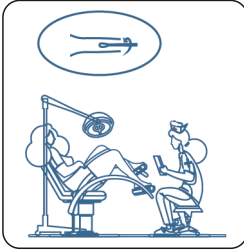


1. Probennahme

Probennahme durch vaginal- oder Harnröhrenabstrich

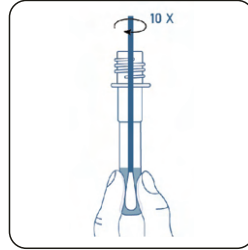


2. Probe mischen

Tupfer in das Röhrchen einführen, mischen, 10-mal ausdrücken, dann Tupfer entsorgen

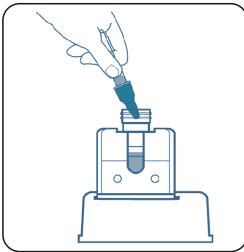


3. Proben transfer

Überführen der Probe in die Testkarte

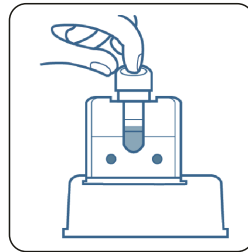


4. Verteilung der Probe

Probe wird durch Drücken des Deckels in die Reaktionskammern injiziert

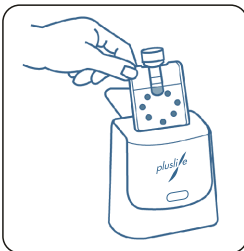

5. Testdurchlauf

Einschalten des Geräts und Verbindung mit der App, Reaktionskarte einlegen und Test starten

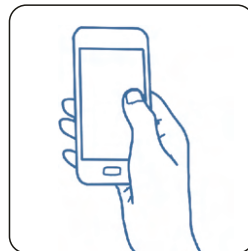

6. Testergebnis ablesen

Ablesen der Testergebnisse in der App

Anwendungsbereiche



Praxis




Krankenhaus



Testcenter

Spezifikationen

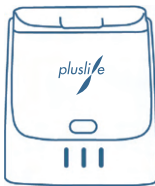

Pluslife Mini Dock

Abmessungen	101 x 91 x 65 mm
Gewicht	210 g
Software	Smartphone-App oder PC
Einsatztemperatur	15–30 °C
Luftfeuchtigkeit	≤ 80%

Pluslife NG/UU Testkarte

Zielpathogene	<i>N. gonorrhoeae</i> und <i>U. urealyticum</i>
Nachweisgrenze (LoD)	1000 Kopien/mL
Durchlaufzeit (TAT)	35 Min.
Haltbarkeit	9 Monate bei Raumtemperatur
Probennahme	Vulvovaginal- oder Hamnröhrenabstrich

Guangzhou Pluslife Biotech Co.,Ltd.

Floor 3, Block E, Runhui Science & Technology Park, No.18 Shenzhou RD, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China

+86-020-31703986 market@pluslife.com www.pluslife.com



Website



LinkedIn



Line

PLNGUU-INT-20220817

Ihr Vertriebspartner in Deutschland

Haben Sie Fragen?

KONTAKTIEREN SIE UNS +49 - 6151 - 8002380